

	H46	H50
Montant avant bras droit	H4602EDU	H5002EDU
Montant avant bras gauche	H4602EGU	H5002EGU
Montant avant bras extérieur droit à chape	H5001EDU	H5001EDU
Montant avant bras extérieur gauche à chape	H5001EGU	H5001EGU
2 Vis d'articulation	V0125	V0125

Restriction d'utilisation / Précautions d'emploi

- ⤿ Les ferrures doivent être utilisées dans les limites de poids conseillées et suivant l'appréciation de l'orthoprothésiste agréé en fonction du patient à appareiller
- ⤿ La maintenance du produit reste à l'appréciation de l'orthoprothésiste selon le cadre de l'utilisation
- ⤿ L'assemblage et l'ajustage doivent être effectués par un personnel qualifié
- ⤿ Chauffer la pièce au chalumeau avant de modifier sa forme (tout formage à froid exclut la garantie)

Entretien / Stockage

- ⤿ Stocker le produit à l'abri de l'humidité et dans son emballage d'origine (sur lequel est inscrit son numéro de lot)
- ⤿ La fréquence des visites de contrôle de l'appareil reste à l'appréciation de l'orthoprothésiste en fonction du patient à appareiller

Garantie

La garantie est valable 1 an pour une utilisation conforme aux instructions du fabricant à partir de la date d'achat du produit.

NB : Pour toutes réclamations veuillez joindre un formulaire de retour dûment complété, tout formulaire incomplet ne pourra être traité.

Marquage CE

Groupe G2M déclare, en sa qualité de distributeur, que toutes ses pièces sont conformes à la directive 93/42/CE.



H46

Désignation

Ferrure de bras en acier demi-dur.

- ⤿ H46 : Ferrure pour bras, articulation à chape, petit montant du bas pour plastique
- ⤿ H50 : Ferrure pour bras, articulation à chape

Destination

Ferrure de bras entrant dans la fabrication d'orthèses du membre inférieur.

	H46	H50
Montant avant bras droit	H4602EDU	H5002EDU
Montant avant bras gauche	H4602EGU	H5002EGU
Montant avant bras extérieur droit à chape	H5001EDU	H5001EDU
Montant avant bras extérieur gauche à chape	H5001EGU	H5001EGU
2 Vis d'articulation	V0125	V0125

Restriction d'utilisation / Précautions d'emploi

- Les ferrures doivent être utilisées dans les limites de poids conseillées et suivant l'appréciation de l'orthoprothésiste agréé en fonction du patient à appareiller
- La maintenance du produit reste à l'appréciation de l'orthoprothésiste selon le cadre de l'utilisation
- L'assemblage et l'ajustage doivent être effectués par un personnel qualifié
- Chauffer la pièce au chalumeau avant de modifier sa forme (tout formage à froid exclut la garantie)

Entretien / Stockage

- Stocker le produit à l'abri de l'humidité et dans son emballage d'origine (sur lequel est inscrit son numéro de lot)
- La fréquence des visites de contrôle de l'appareil reste à l'appréciation de l'orthoprothésiste en fonction du patient à appareiller

Garantie

La garantie est valable 1 an pour une utilisation conforme aux instructions du fabricant à partir de la date d'achat du produit.

NB : Pour toutes réclamations veuillez joindre un formulaire de retour dûment complété, tout formulaire incomplet ne pourra être traité.

Marquage CE

Groupe G2M déclare, en sa qualité de distributeur, que toutes ses pièces sont conformes à la directive 93/42/CE.



H46

Désignation

Ferrure de bras en acier demi-dur.

- H46 : Ferrure pour bras, articulation à chape, petit montant du bas pour plastique
- H50 : Ferrure pour bras, articulation à chape

Destination

Ferrure de bras entrant dans la fabrication d'orthèses du membre inférieur.