

## Restriction on use / Precautions for use

- ⌋ The product must be used within the recommended weight limits and in accordance with the assessment made by an approved ortho-prosthetist depending on the patient concerned
- ⌋ Product maintenance is subject to an assessment made by an approved orthoprosthetist depending on the conditions of use
- ⌋ All assembly and adjustment work must be carried out by qualified personnel

## Cleaning / Storage

- ⌋ Stock the product in a dry place, in its original packing (on which the batch number is marked)
- ⌋ The frequency of inspections to check the equipment is subject to the assessment made by the ortho prosthetist depending on the patient concerned

## Guarantee

The guarantee is valid for one year as from the date of purchase of the product, if the product has been used in accordance with the manufacturer's instructions.

*N.B. In the event of a complaint, please enclose a return form correctly filled in, incomplete forms cannot be dealt with.*

## EC markings

Groupe G2M hereby declares, in its quality as the manufacturer, that all its parts comply with directive 93/42/EC.



L56



L59

## Désignation

Étrier de chaussure à articulation libre.

- ⌋ L56 : Série forte Tête : Ø 26 mm Ép. : 4 mm Long. : de 250 à 300 mm
- ⌋ L57 : Série légère Tête : Ø 24 mm Ép. : 3 mm Long. : de 180 à 250 mm
- ⌋ L58 : Série enfant Tête : Ø 22 mm Ép. : 3 mm Long. : de 140 à 180 mm

Étrier de chaussure à butées postérieure et antérieure.

- ⌋ L59 : Série forte Tête : Ø 26 mm Ép. : 4 mm Long. : de 250 à 300 mm
- ⌋ L60 : Série légère Tête : Ø 24 mm Ép. : 3 mm Long. : de 180 à 250 mm
- ⌋ L61 : Série enfant Tête : Ø 22 mm Ép. : 3 mm Long. : de 140 à 180 mm

Étrier de chaussure avec réserve.

- ⌋ L62 : Série forte Tête : Ø 26 mm Ép. : 4 mm Long. : de 250 à 300 mm
- ⌋ L63 : Série légère Tête : Ø 24 mm Ép. : 3 mm Long. : de 180 à 250 mm
- ⌋ L64 : Série enfant Tête : Ø 22 mm Ép. : 3 mm Long. : de 140 à 180 mm

## Destination

Étrier de chaussure entrant dans la fabrication d'orthèses du membre inférieur.

## Restriction d'utilisation / Précautions d'emploi

- Les étriers doivent être utilisés dans les limites de poids conseillées et suivant l'appréciation de l'orthoprothésiste agréé en fonction du patient à appareiller
- La maintenance du produit reste à l'appréciation de l'orthoprothésiste selon le cadre de l'utilisation
- L'assemblage et l'ajustage doivent être effectués par un personnel qualifié

## Entretien / Stockage

- Stocker le produit à l'abri de l'humidité et dans son emballage d'origine (sur lequel est inscrit son numéro de lot)
- La fréquence des visites de contrôle de l'appareil reste à l'appréciation de l'orthoprothésiste en fonction du patient à appareiller

## Garantie

La garantie est valable 1 an pour une utilisation conforme aux instructions du fabricant à partir de la date d'achat du produit.

*NB : Pour toutes réclamations veuillez joindre un formulaire de retour dûment complété, tout formulaire incomplet ne pourra être traité.*

## Marquage CE

Groupe G2M déclare, en sa qualité de distributeur, que toutes ses pièces sont conformes à la directive 93/42/CE.

## L56/L57/L58/L59/L60/L61/L62/L63/L64



L56



L59

## Designation

Stirrup for shoe with free articulation.

- |                    |                |              |                       |
|--------------------|----------------|--------------|-----------------------|
| ⌚ L56 : Strong set | Head : Ø 26 mm | Thick : 4 mm | Long. : 250 to 300 mm |
| ⌚ L57 : Light set  | Head : Ø 24 mm | Thick : 3 mm | Long. : 180 to 250 mm |
| ⌚ L58 : Child set  | Head : Ø 22 mm | Thick : 3 mm | Long. : 140 to 180 mm |

Stirrup for shoe with front and rear buffers.

- |                    |                |              |                       |
|--------------------|----------------|--------------|-----------------------|
| ⌚ L59 : Strong set | Head : Ø 26 mm | Thick : 4 mm | Long. : 250 to 300 mm |
| ⌚ L60 : Light set  | Head : Ø 24 mm | Thick : 3 mm | Long. : 180 to 250 mm |
| ⌚ L61 : Child set  | Head : Ø 22 mm | Thick : 3 mm | Long. : 140 to 180 mm |

Stirrup for shoe with reserve.

- |                    |                |              |                       |
|--------------------|----------------|--------------|-----------------------|
| ⌚ L62 : Strong set | Head : Ø 26 mm | Thick : 4 mm | Long. : 250 to 300 mm |
| ⌚ L63 : Light set  | Head : Ø 24 mm | Thick : 3 mm | Long. : 180 to 250 mm |
| ⌚ L64 : Child set  | Head : Ø 22 mm | Thick : 3 mm | Long. : 140 to 180 mm |

## Purpose

Stirrup for shoe used for the manufacture of an orthosis for a lower limb.