

## Montage

Afin d'optimiser vos montages, nous vous recommandons d'utiliser ces pièces en combinaison avec celles de la gamme JANTON de classe identique et de même section.

## Réglages

L'ensemble repose pieds est réglable en profondeur et en hauteur grâce aux différentes coulisses et molettes de serrage. La longueur du tube du segment jambier peut être recoupée.

## Restriction d'utilisation / Précautions d'emploi

- Les repose pieds doivent être utilisés dans les limites de poids conseillées
- La maintenance du produit reste à l'appréciation de l'orthoprothésiste selon le cadre de l'utilisation
- L'assemblage et l'ajustage doivent être effectués par un personnel qualifié

## Entretien / Stockage

- Stocker le produit à l'abri de l'humidité
- La fréquence des visites de contrôle du châssis reste à l'appréciation de l'orthoprothésiste en fonction du patient à appareiller
- Pour l'entretien, ne pas utiliser de solvants

## Garantie

La garantie est valable 1 an pour une utilisation conforme aux instructions du fabricant à partir de la date d'achat du produit.

*NB : Pour toutes réclamations veuillez joindre un formulaire de retour dûment complété, tout formulaire incomplet ne pourra être traité.*

## Marquage CE

Groupe G2M déclare, en sa qualité de distributeur, que toutes ses pièces sont conformes à la directive 93/42/CE.

## T90-C102 / T90-C103 / T90-C104 / T90-C106



T90-C102



T90-C103



T90-C104



T90-C106


## Désignation

- T90-C102 : Repose pied central simple
- T90-C103 : Repose pied central angulable
- T90-C104 : Repose pied central simple pour plateau
- T90-C106 : Repose pied central angulable pour plateau


## Destination

- Ensemble repose pieds entrant dans la fabrication de châssis de position assise pour patient polyhandicapé ou atteint d'infirmité motrice et cérébrale

## Pièces détachées

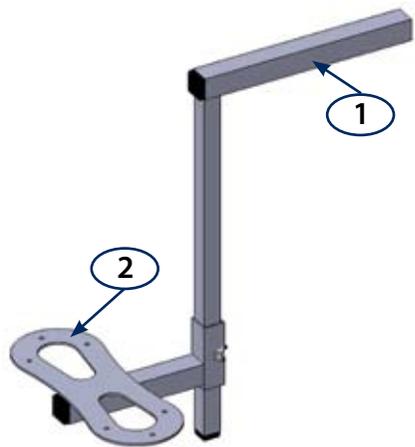

**T90-C102**

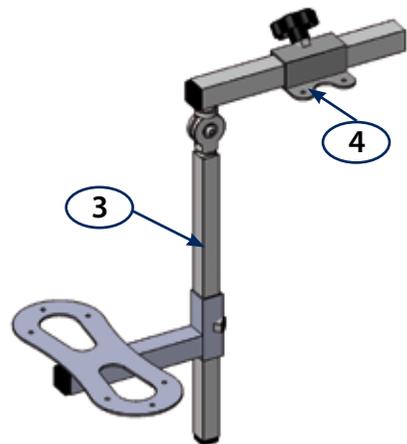

**T90-C106**


1	Segment jambier central simple	T90113-16
2	Repose pied central	T90125-20
3	Segment jambier central angulable	T90111-16
4	Coulisse simple	T90100-25

## Compatibilités

- Les repose pieds T90-C102 et T90-C103 se montent directement sur les châssis position assise PLIMO 2 et ECHO
- Les repose pieds T90-C104 et T90-C106 se montent sur tous les plateaux receveur de coque


## Mise en place

Exemple de montage

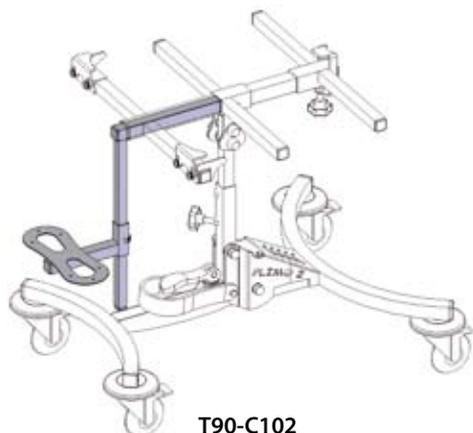


**T90-C102**

monté sur un châssis

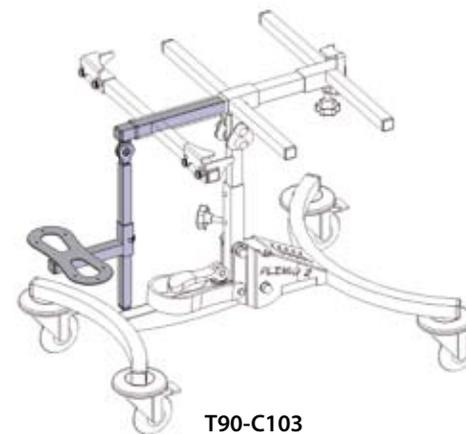


**T90-C103**

monté sur un châssis

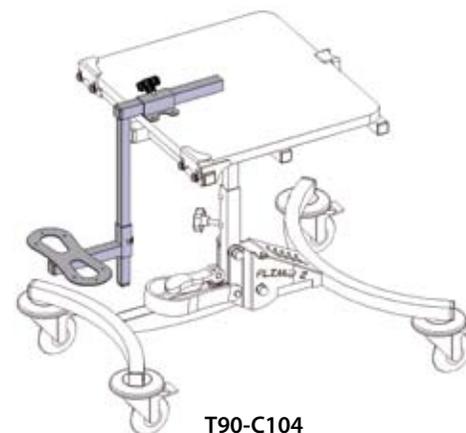

**T90-C104**

monté sur plateau

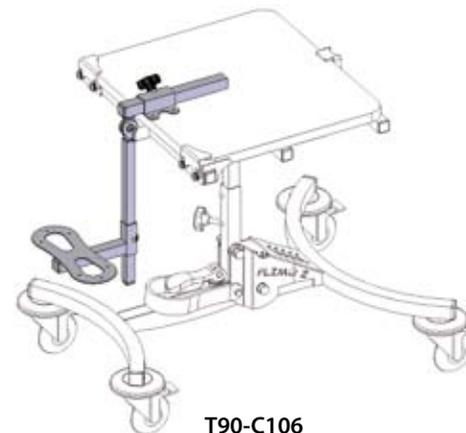

**T90-C106**

monté sur plateau